

1. Product naam: urine opvang zak
2. Specificatie en model: 20230602 gebruiksperiode 5 jaar.
3. product uitvoering, structuur en compositie: dit product bestaat uit een katheter opvangzak (silicone type), elastische fixatie riem, katheter connectie. Niet steriel. Product is herbruikbaar
4. Gebruik: geschikt voor opvangen van urine.
5. Gebruiksaanwijzing:
  - Bevestig de externe katheter in het fixatie broekje
  - Bevestig de externe katheter een de urine opvangzak.
  - Trek het broekje aan: zorg dat de externe katheter de urethra volledig bedekt.
  - Zorg dat de urine opvangzak lager hangt dan de externe katheter. Aan de hand van fixatie middelen kunt u de zak aan uw been bevestigen.
  - Controleer op eventuele drukplekken van het fixatie materiaal of van de externe katheter zelf. Verhelp zo nodig drukplekken om complicaties te voorkomen.
  - Controleer het doorlopen van de katheter en de urine productie.
  - \*zorg dat alle onderdelen strak aan elkaar bevestigd zijn.
  - \*Het is raadzaam om tijdens gebruik in bed een zeilstof onderlegger te gebruiken om lekkages en huidirritatie te beperken.
6. Voorzorgsmaatregel: - De urethra moet zo nauwkeurig mogelijk bedekt zijn door de opening van de externe katheter om lekkage te minimaliseren .
  - De katheterzak is strak bevestigd aan de externe katheter om lekkage te voorkomen.
  - De externe katheter mag zich nooit lager bevinden dan de urine opvangzak.
  - Bij langdurig gebruik moet het contact tussen de katheterzak en de huid droog en hygiënisch zijn.
  - let op voor een silicone allergie. Merkt u huid irritatie of andere veranderingen, stop het gebruik onmiddellijk en neem contact op met uw arts.
  - De katheterzak kan u reinigen aan de hand van stromend kraan water. Spoel de zak door en laat deze aan de lucht drogen.
  - Het is aan te raden om twee externe katheter setten afwisselend van elkaar te gebruiken.
  - U kunt een set ongeveer 2 tot 3 maanden aan een stuk gebruiken. De opvangzakken gelieve wekelijks te vervangen.
7. Contra-indicaties: Dit product niet gebruiken bij afwijkingen aan het genitale gebied of bij allergische reacties op silicone en/of plastic.
8. Bergingsmethodiek: bewaar het materiaal binnen een droge ruimte met kamertemperatuur. Opslag - Droge opslag tussen 5-40°Celsius. - Vermijd directe blootstelling aan de zon tijdens opslag. Houdbaarheid - Op basis van vergelijkbare urinoirs van PP en PC is het urinoir ongeveer vijf (5) jaar houdbaar. Weggooien - Volg de geldende (lokale) voorschriften voor het weggooien. U kunt de beenzak 7 dagen gebruiken. Zo nodig verwisselt u de beenzak eerder bij bijvoorbeeld geurvorming.
9. Aanwijzingen voor het gebruik Voor het gebruik - Controleer het urinoir voor gebruik op beschadigingen. - Gebruik geen ongeschikt of beschadigd materiaal. Na het gebruik - Leeg het urinoir in het toilet of de toiletspoeler. - Reinig (of spoel) het urinoir na gebruik met desinfectiemiddelen uit de Ctgb-database
10. Kruisbesmetting - Het urinoir is meervoudig te gebruiken voor slechts één patiënt. Deel het urinoir niet met andere personen om uzelf te beschermen tegen mogelijke kruisbesmettingen.